

Ghid de pornire rapidă Orbit Writer™

Orbit Writer este o tastatură Braille unică în stil Perkins, care permite unui utilizator nevăzător sau cu deficiențe de vedere să acceseze toate funcțiile unui computer sau smartphone, cum ar fi navigarea pe web, e-mailul și mesageria text.

Acest ghid oferă instrucțiuni de bază pentru utilizarea Orbit Writer. Pentru instrucțiuni și informații mai complete, consultați Ghidul utilizatorului Orbit Writer online la <http://www.orbitresearch.com/support/orbit-writer-support/>

Conținut

Următoarele articole sunt incluse în pachet: unitate Orbit Writer, cablu USB (USB-A la Micro-B) și un ghid de pornire rapidă tipărit. Contactați distribuitorul dacă lipsește ceva sau este deteriorat.

Orientarea dispozitivului

Orientarea normală de funcționare a dispozitivului este cu tasta mai largă din mijloc spre dvs. Tasta mai lată din mijloc este tasta Spațiu, tasta din stânga este tasta Dot 7, iar tasta din dreapta este tasta Dot 8.

Cele șase taste de intrare Braille sunt situate aproape de marginea dispozitivului cel mai îndepărtat de dvs. Începând din stânga, tastele sunt numite Punct 3, Punct 2, Punct 1, Punct 4, Punct 5 și Punct 6. Aceste taste sunt folosite pentru a tasta în braille și pentru a introduce comenzi. În centrul unității, se află tastatura de navigație cu patru butoane direcționale (săgețile sus, jos, stânga și dreapta) și un buton de selectare.

Un port Micro-USB se află în partea stângă a dispozitivului. Este folosit pentru încărcare și conectare la un computer sau smartphone.

Încărcarea dispozitivului

Vă recomandăm să încărcați complet dispozitivul înainte sau în timpul primei utilizări. Pentru a încărca bateria, conectați capătul mic al cablului furnizat la portul USB, asigurându-vă că cei doi pini de pe partea plată sunt orientați în sus. Introduceți celălalt capăt al cablului în orice încărcător USB adecvat sau în portul USB al unui computer

Pornire și oprire

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsată tastele săgeată sus și jos împreună timp de o secundă până când simțiți un impuls scurt de vibrație. Dacă dispozitivul este deja pornit, apăsarea și menținerea tastelor săgeată sus și jos timp de o secundă îl va opri. Acest lucru este indicat de un impuls lung de vibrație.

Conectarea la un smartphone sau computer

Orbit Writer se poate conecta la computere și dispozitive mobile pentru a accesa toate funcțiile și caracteristicile acestora. Următoarea este o descriere simplă a pașilor pentru conectare. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului.

Pasul 1. Porniți Orbit Writer apăsând tastele săgeată sus + jos. Răspunde cu un impuls scurt de vibrație.

Pasul 2. Puteți conecta Orbit Writer la mai multe dispozitive. Fiecare conexiune se numește canal. Canalul 1, canalul implicit, este deja setat. Activați asocierea pe canalul 1 apăsând și menținând apăsat Spațiu + Săgeată stânga + Punct 1 până când simțiți un impuls scurt de vibrație. Pentru a citi despre utilizarea altor canale, vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului.

Pasul 3. Pe smartphone sau computer, căutați dispozitivele Bluetooth disponibile și găsiți dispozitivul "Orbit Reader 20 XXXX", unde XXXX sunt ultimele 4 cifre ale numărului de serie al Orbit Writer și inițiați asocierea. Orbit Writer răspunde cu un singur impuls scurt atunci când s-a împerecheat cu succes.

Pentru dispozitivele iOS, accesează Configurări > accesibilitate > VoiceOver și activează VoiceOver. Apoi accesați elementul Braille și selectați-l. Căutați în lista de afișaje Braille disponibile "Orbit Reader 20" urmat de ultimele patru cifre ale numărului de serie al Orbit Writer și selectați acest lucru.

Pentru dispozitivele iOS, Orbit Writer răspunde cu trei impulsuri scurte de vibrație. Primul impuls scurt indică faptul că s-a asociat cu succes, iar alte două indică faptul că s-a conectat cu succes la dispozitivul iOS. Odată ce s-a asociat și s-a conectat, este important să blocați și să deblocați mai întâi dispozitivul iOS înainte de a utiliza Orbit Writer cu acesta. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare.

Când blochezi sau deblochezi dispozitivul iOS, Orbit Writer emite două impulsuri scurte de vibrație pentru a indica conexiunea sau deconectarea cu Voiceover.

Note:

1. Dacă conexiunea eșuează, ștergeți înregistrarea de asociere de pe dispozitiv și încercați din nou pașii de mai sus.

2. Până la cinci dispozitive pot fi asociate simultan prin Bluetooth la Orbit Writer. Pentru a utiliza un alt canal decât canalul 1, consultați Ghidul utilizatorului pentru mai multe informații.
3. Dacă Orbit Writer este deja pornit și smartphone-ul este trezit (din cauza unei notificări sau a unei apăsări de buton), acesta se va reconecta imediat.
4. Dacă dispozitivul iOS este deja activ și Orbit Writer este pornit, acesta se va reconecta automat la ultimul dispozitiv utilizat. Reconectarea poate dura până la 10 secunde.

Informații suplimentare

Pentru cele mai recente informații, specificații, sfaturi de depanare, instrucțiuni de actualizare a software-ului, informații despre îngrijire și utilizare, informații despre garanție și instrucțiuni mai detaliate, vizitați pagina web de asistență Orbit Writer la <http://www.orbitresearch.com/support/orbit-writer-support/>.

Pentru întrebări sau nelămuriri suplimentare care nu sunt acoperite în acest Ghid de pornire rapidă sau în Ghidul utilizatorului, vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat Orbit Writer.